



Por favor,

lea estas instrucciones detenidamente porque contienen información importante para usted sobre el uso de este dispositivo médico.

Protegen® PLUS

Hialuronato de sodio 0.25 mg/ml y
dexpantenol 20 mg/ml

Mejora la humectación, refresca y protege la mucosa nasal.

Solución estéril sin conservantes para aplicación nasal.

Composición:

1 ml de Protegen® PLUS contiene 0.25 mg de hialuronato de sodio, 20.0 mg de dexpantenol, dihidrógeno fosfato sódico dihidrato, fosfato disódico dihidrato, sorbitol y agua para inyecciones.

¿Para qué se usa Protegen® PLUS?

Este pulverizador nasal se usa para mejorar la humectación, refrescar y proteger la mucosa nasal. También se recomienda como medida de soporte en pacientes con resfriado común.

¿Cuándo debe usarse Protegen® PLUS?

En ambientes secos, con aire acondicionado o bajo la influencia del viento y del sol, la mucosa nasal puede resecarse. En estos casos se aconseja usar Protegen® PLUS para **proporcionar una humectación intensa de la mucosa nasal, restableciendo el equilibrio de la hidratación natural.**

Protegen® PLUS contiene la sal de sodio del ácido hialurónico, una sustancia fisiológica que también se encuentra en el organismo. El hialuronato de sodio de cadena larga tiene la propiedad física única de **formar una película lubricante estable y uniforme que se adhiere bien a la mucosa nasal. Por tanto, el efecto humectante es especialmente prolongado.**

Además, Protegen® PLUS contiene también dexpantenol, que pertenece al amplio grupo de las vitaminas B. Este componente **contribuye a la regeneración intensa de la mucosa nasal a la vez que favorece el efecto lubricante del hialuronato de sodio.**

Debido a estas propiedades especiales Protegen® PLUS es especialmente adecuado para el **tratamiento concomitante del resfriado común con un descongestionante en pulverizador o gotas nasales.**

En este caso, Protegen® PLUS debe utilizarse durante más tiempo que el tratamiento con el medicamento descongestivo para contribuir a la regeneración óptima de la mucosa nasal.

¿Cómo debe aplicarse Protegen® PLUS?

Use Protegen® PLUS únicamente si el precinto de la caja está intacto antes del primer uso ().



Retire la tapa antes del uso. Presione varias veces el pulverizador hasta que salga la primera pulverización (por lo general, 1-2 veces). Después de ello, el sistema está listo para aplicaciones posteriores.

Inserte el pulverizador en el orificio nasal, pulse una vez y aspire profundamente. Según sea necesario, repita la aplicación varias veces al día, realizando 1-2 pulverizaciones en cada orificio nasal.

Como medida de higiene, limpie el pulverizador después de cada uso y cierre el dispositivo cuidadosamente con la tapa.

Indicaciones para el uso:

Cada dispositivo debe ser utilizado por una sola persona por motivos higiénicos y para evitar una posible transmisión de infecciones.

Por razones técnicas, siempre queda un pequeño resto en el envase.

¿Qué otras recomendaciones deben seguirse para la aplicación?

En caso de tratamiento concomitante con otros pulverizadores o gotas nasales, debe transcurrir un plazo de al menos 30 minutos entre las aplicaciones. Protegen® PLUS debe aplicarse siempre en último lugar.

Pregunte a su médico o farmacéutico si no está seguro de cómo combinar diferentes tratamientos nasales.

Dado que Protegen® PLUS no contiene conservantes, se tolera adecuadamente, también en tratamientos prolongados. Por tanto, Protegen® PLUS puede usarse durante períodos más extensos.

En base a la experiencia existente, Protegen® PLUS puede usarse en niños y en mujeres embarazadas y en período de lactancia.





¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo puede usarse Protegen® PLUS?

Protegen® PLUS debe usarse en función de su afección y siguiendo las instrucciones proporcionadas por el médico o farmacéutico.

En general, se aplican 1 - 2 pulverizaciones de Protegen® PLUS 3 veces al día en cada orificio nasal. Si fuera necesario, también puede utilizarse con mayor frecuencia. La duración de uso no está limitada. Protegen® PLUS es adecuado para el tratamiento prolongado. Sin embargo, como sucede con cualquier tratamiento, debe consultar a su médico si las molestias persisten.

¿Cuándo no debe usarse Protegen® PLUS?

No utilice Protegen® PLUS si es hipersensible a cualquiera de los componentes.

¿Cómo debe conservarse Protegen® PLUS?

Conservar a temperatura no superior a 25 °C.

No use Protegen® PLUS después de la fecha de caducidad (☞).

Después de su apertura inicial, Protegen® PLUS puede usarse hasta por 6 meses, porque el dispositivo impide la contaminación del contenido. Anote en el espacio previsto en el estuche la fecha de la primera apertura, y consérvelo.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Fecha de revisión:

Enero 2020

Fabricante (🏭):

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken
Alemania

Fabricado para ALEXIAPHARMA S.A. (Quito - Ecuador)
Por URSAPHARM (Saarbrücken - Alemania)

Importado y distribuido por:

ALEXIAPHARMA S.A. (Quito - Ecuador)

Reg. San. Alemania: DD 60132729 0001

Reg. San. Ecuador: 7304-DME-0719

VENTA LIBRE

STERILE A

